

Правила ухода:

Основа: Игрушку очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором. Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.

Чехол: Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 30°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования:

В случае прокола НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ надувную игрушку. Отремонтированная игрушка не гарантирует безопасность использования.

Правила хранения: Хранить изделие при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок: Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной инструкции.

Гарантийными случаями не являются:

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Обратите внимание!

В связи с тем, что глаза и мордочка игрушки раскрашены вручную, возможны небольшие потеки, распылчатость и неровность краски. Это не дефект и гарантийным случаем не является.

Срок годности: Не установлен.

Правила утилизации: По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Утилизировать с бытовым мусором.

Игрушки для детей старше трех лет. Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9881 от 03.04.2020 г. выдан Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

www.kinera.com

www.nikamed.ru

**KINERAPY**
ADVANCED REHABILITATION TECHNIQUES

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фигура-тренажер
балансировочная для детей
Лошадь
KINERAPY HORSE

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профессионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её реализовать. Выбранное Вами медицинское изделие произведено в соответствии со стандартом EN ISO 13485, обеспечивающим высокое качество и безопасность эксплуатации, и зарегистрировано в Росздравнадзоре. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологичных полимерных материалов с использованием биопластификатора, исключающего содержание токсинов и опасных для здоровья фталатов.

Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами использования изделий.

**Фигура-тренажер балансировочная для детей Лошадь KINERAPY HORSE**

Игрушка для детей старше трех лет.

Область и способ применения:

Фигура-тренажер балансировочная для детей Лошадь предназначена для гимнастики и игр для детей от 3 до 5 лет.

Сидя на спине Лошади и упираясь стопами в пол, ребёнок может совершать вставания и пружинящие приседания.

Изделие предназначено для многократного личного использования.

Конструкция:

Игрушка изготовлена из материала повышенной упругости. У Лошади широкие опорные ноги и большие уши для удержания равновесия. Глаза, нос и линии на мордочке раскрашены вручную.

Чехол к игрушке идет опционально.

**Правила подбора:**

Для безопасного использования тренажера необходимо, чтобы при сидении ребёнка на тренажере его стопы полностью опирались на пол. Максимальная нагрузка на тренажер не должна превышать 40 кг.

Правила использования:

Накачайте тренажер с помощью насоса для накачивания мячей. Во избежание переполнения воздухом и разрыва не используйте для накачивания воздушный компрессор. Высота спинки Лошади не должна превышать 26 см.

Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Комплектность:

Фигура-тренажер Лошадь арт. RK701, заглушка, инструкция.

Показания:

- угнетение моторики и чувства баланса у детей и подростков;
- нарушения осанки у детей и подростков;
- восстановление и реабилитация после:
 - травм опорно-двигательного аппарата.
 - обострения дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата;
 - поражений периферических нервов различного генеза;
- состояния, требующие применения в качестве терапии лечебной физкультуры и оздоровительных методик у детей и подростков.

Противопоказания:

- невозможность выполнения реабилитационных методик по комплексу патологий;
- гнойно-септические поражения кожных покровов в непосредственных зонах воздействия изделий;
- неадекватное состояние пациента;
- индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделий.

Побочные действия:

До настоящего времени не выявлены. Изделие при использовании не вызывает нарушений кровообращения и целостности кожных покровов.

Состав:

ПВХ.